



1



Embora não seja normalmente utilizado na prática, é útil saber como utilizar um saco de contenção de gatos. Estão geralmente disponíveis em três tamanhos diferentes, e deve saber seleccionar o tamanho mais apropriado para o gato que está a conter. Antes de usar, verifique quaisquer fechos que possam necessitar de fixação.

2



Abra o saco, pronto a receber o gato.
O saco deve ser colocado sobre uma superfície sólida antiderrapante, por exemplo, uma bancada/marquesa de exame é o ideal.

3



Pegue lentamente e suavemente no gato ao redor do peito e dos ombros e coloque-o cuidadosamente no saco aberto.

4



Com uma mão no gato, prenda suavemente a correia de velcro em torno do pescoço.

5



Assim que a correia do pescoço estiver segura, prenda o velcro ao longo de todo o fecho. Certifique-se que tem sempre uma mão sobre o gato.

6



Feche o fecho na parte de trás.



7



Verifique duas vezes se o fecho e as correias de velcro estão seguros e certifique-se de que não prendeu nenhum pelo do gato no fecho.

8



A colocação de uma mão de cada lado do gato pode ajudar a reduzir qualquer ansiedade e impedir a sua movimentação.

9



Se o acesso a um membro for necessário, ou seja, para a colocação de cateter intravenoso, assegure-se que a cabeça é suavemente levantada colocando uma mão debaixo do pescoço. Desaperte o fecho no local exato.

10



Remova cuidadosamente o membro torácico do gato através da abertura do fecho, e estenda-o para a frente.