

1



A pinça de contenção de gatos é raramente utilizada na prática. Só deve ser usada quando todos os outros métodos de contenção físicos falharam.

Pode ser utilizada em situações de emergência, em que o bem-estar do animal esteja em risco, e caso não exista um assistente que ajude à contenção.

2



A pinça de contenção de deve ser manuseada como ilustrado na imagem acima.

3



Aproxime-se calmamente do gato e coloque a extremidade da pinça suavemente à volta do pescoço do gato.

4



É vital manter os braços esticados alongando o comprimento do cabo da própria pinça, de forma a evitar que o manipulador seja mordido ou arranhado.

5



Uma vez a pinça encaixada em torno do pescoço, feche-a suavemente para evitar que o gato fuja da pega.

*Tenha cuidado para não apertar demasiado a pinça, o que comprometeria as vias respiratórias ou o bem-estar do gato.*

6



Uma vez que a pega da pinça esteja em torno do pescoço do gato, é vital manter o cabo fechado.